



РЕПРОЦЕСИНГ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

ОЧИЩЕННЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ДВР
СТЕРИЛІЗАЦІЯ



БЛАНІДАС

СИЛА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ГІГІЄНИ



Антисептичні засоби

Дезінфекція діалітичних систем

Догляд та гігієна пацієнта

Загальна дезінфекція


Ниркова терапія та діаліз

Репроцесинг медичних виробів

Гігієна та дезінфекція ендоскопів

Медичний клінінг та його імплементація

www.blanidas.ua

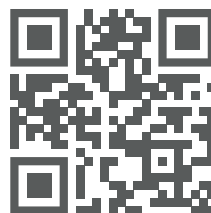

КОНЦЕНТРОВАНІ РОЗЧИНИ для ПЕРВИННОГО ТА ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОБОРОБЛЕННЯ (ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ)

Бланідас Актив **BLANIDAS Active**



Високоєфективний дезінфекційний засіб призначений
для повного циклу обробки медичних виробів

Застосовується:

- Дезінфекція медичних виробів
- Первинного та передстерилізаційного оброблення
- Стерилізація інструментів включаючи складні багаторазові медичні вироби

Засіб забезпечує широкий спектр антимікробної дії.

Добре сумісний з більшістю матеріалів.

Посилена формула засобу дозволяє безпечно
дезінфікувати не тільки інструменти, а й прилади,
обладнання, апаратуру та предмети оточення пацієнтів.

- ✓ безальдегідний і нехлорний –
безпечний для чутливих матеріалів;
- ✓ без запаху, не подразнює;
- ✓ має виражені мийні властивості (85%);



Термін придатності робочих розчинів – 16 діб.

СКЛАД ЗАСОБУ

Склад, мас. %: додецилбіспропілентриамін (1,3-
пропандіамін) – 15,0-20,0, алкілдиметилбензиламоній
хлорид – 10,0-15,0 (діючі речовини), поверхнево-активні
речовини, інгібітори корозії, вода очищена – до 100,0.



КОНЦЕНТРАТ



ІНСТРУКЦІЯ

1 л

10 мл

5 л



Бланідас® Актив

Концентрований засіб для дезінфекції,
достерилізаційного очищення та стерилізації ВМП.
Для знищення збудників внутрішньо-
лікарняних інфекцій бактеріальної
етіології (вкл. туберкульоз, особливо
небезпечні інфекції), вірусів (вкл. гепатити
А, В, С), вірусу СНІД (ВІЛ), вірусу «пташиного
грипу» А (H5N1), вірусу «свинячого
грипу» А (H1N1), грибів, спор.

Для дезінфекції, достерилізаційного очищення
та стерилізації виробів медичного призначення,
глибини і жорстких ендоскопів та інструментів
до них, хірургічних, гінекологічних,
стоматологічних інструментів тощо.

Дезінфекція:

- поверхню дещальної апаратури, кушетки,
датчики до апаратів ультразвукового
обстеження тощо;
- поверхню обладнання, приладів,
устаткування тощо;
- для дезінфекції високого рівня стерилізації;
- для знезараження перед утилізацією
використаних виробів медичного
призначення одноразового використання.

ЕФЕКТИВНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ + ДОСТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ + ДВР + СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Склад засобу, мас. %: додецилбіспропілентри-
амін (1,3-пропандіамін) – 15,0-20,0; алкіл-
диметилбензиламоній хлорид – 10,0-15,0 (діючі
речовини); поверхнево-активні речовини;
інгібітори корозії; вода очищена – до 100,0.

Заходи безпеки: всі роботи із засобом слід
проводити у захисному одязі, захищаючи
шкіру, руки, очі, уникаючи попадання
його в очі та на шкіру.

Термін та умови зберігання засобу:
зберігати при температурі від 0 °С до +40 °С
в приміщеннях, захищених від вологи і
прямого сонячного проміння, остерорно
від джерел вогню та тепла.

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01015,
м. Київ, вул. Добровольних Батальйонів, 17
тел.: 0 800 33 15 02
e-mail: help@blanidas.ua,
www.blanidas.ua
Вироблено в Україні

КОНЦЕТРОВАНІ РОЗЧИНИ для ПЕРВИННОГО ТА ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОБОРОБЛЕННЯ (очищення та дезінфекції)

Бланідас Актив Ензим BLANIDAS Active Enzyme

КОНЦЕНТРАТ

Призначений для дезінфекції та очищення від органічних забруднень

Ферментна дія забезпечує розщеплення органічних забруднень до розчинних компонентів, що легко змиваються водою, готуючи інструменти до подальшої дезінфекції або стерилізації.



20 мл

5 л

1 л



- ✓ Ензими (протеаза, ліпаза, амілаза) розщеплюють білки, жири та вуглеводи, тому добре видаляють кров, тканинні залишки та інші біологічні забруднення.
- ✓ Засіб не пошкоджує поверхні медичних виробів (особливо чутливі матеріали — ендоскопи, пластик, гума), на відміну від агресивних хімічних речовин.
- ✓ Працює у теплій або холодній воді, що знижує витрати енергії та запобігає «запіканню» білка на інструментах.
- ✓ Швидке розщеплення органічних забруднень дозволяє прискорити процес обробки перед стерилізацією.
- ✓ Оскільки органічні залишки повністю видаляються, дезінфікуючі засоби діють ефективніше.



Термін придатності робочих розчинів – 28 діб.

СКЛАД ЗАСОБУ

Склад, мас. %: алкілдиметилбензиламоній хлорид - 12,0%, дидецилдиметиламонію хлорид - 8,0%, полігексаметиленгуанідин гідрохлорид, 2,0%, ферменти (протеаза, ліпаза, амілаза) - 1,5% (діючі речовини); а також ізопропіловий спирт та інші функціональні компоненти та інгібітори корозії.

Гуасепт Guasept



Засіб дезінфікуючий для дезінфекції
виробів медичного призначення

КОНЦЕНТРАТ

Висококонцентрований розчин із вираженою антимікробною дією, що забезпечує надійну дезінфекцію широкого спектра об'єктів. Рекомендований для знезараження медичних інструментів, приладів та апаратури, включаючи важкодоступні ділянки.



ІНСТРУКЦІЯ

Також може застосовуватися для профілактики та контролю розвитку чорної плісняви в приміщеннях.

- ✓ Забезпечує економічне використання та ефективність при низьких робочих концентраціях.
- ✓ Не утворює нальоту та не впливає на чутливі поверхні.
- ✓ Ефективний для приладів, апаратури та медичних виробів.
- ✓ Активний проти бактерій, вірусів і грибів.
- ✓ Підходить для профілактики та боротьби з чорною пліснявою.
- ✓ Тривалий антимікробний ефект — може створювати пролонговану захисну дію на поверхнях протягом 30 діб.



Робочі розчини зберігають свою активність протягом 2-х місяців за умови їх зберігання у закритих ємностях.

СКЛАД ЗАСОБУ

Склад, мас. %:
26,0±1,5 полігексаметилenguанідину гідрохлориду (ПГМГ),
допоміжні речовини.



КОНЦЕТРОВАНІ РОЗЧИНИ для ПЕРВИННОГО ТА ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОБОРОБЛЕННЯ (очищення та дезінфекції)

Бланідас Оксідез **BLANIDAS Active** **Oxides**



Сучасний дезінфекційний засіб на основі
активного кисню призначений для ефективної
обробки медичних виробів

КОНЦЕНТРАТ



ІНСТРУКЦІЯ

Призначений для первинного оброблення, передстерилізаційного
очищення, дезінфекції, ДВР та стерилізації



1 л

- ✓ Висока ефективність навіть при низьких концентраціях.
- ✓ Відсутність різкого запаху (можливість застосування у акушерських та дитячих стаціонарах).
- ✓ Сумісність з більшістю інструментів.
- ✓ Не фіксує білкові забруднення.

Засіб забезпечує потужну антимікробну активність.
Має спороцидну активність. Оксигенуючий механізм дії
сприяє руйнуванню клітинних структур мікроорганізмів.



Термін придатності робочих розчинів – 15діб.

СКЛАД ЗАСОБУ

Склад, мас. %: перексид водню - 12,0%, алкіл (C12- C16)
диметилбензиламонійхлорид - 3,75%,
полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ) - 2,0%
(діючі речовини); інгібітор корозії, та інші функціональні
добавки, вода – до 100%.



Бланідас Комбі 3000

BLANIDAS Combi 3000

Засіб на основі альдегідів для дезінфекції медичних виробів

Забезпечує високий рівень знезараження.

КОНЦЕНТРАТ

Механізм дії полягає у взаємодії альдегідів з білковими структурами мікроорганізмів. Вони зв'язуються з аміногрупами білків, ферментів і нуклеїнових кислот, викликаючи їх коагуляцію та інактивацію.

Застосовується для дезінфекції виробів медичного призначення, включаючи термолабільні інструменти (включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи та інструменти до них), які не витримують високих температур.

Альдегідні препарати характеризуються широким спектром антимікробної дії та здатністю проникати у важкодоступні ділянки інструментів, забезпечуючи ефективну обробку складних поверхонь.



- ✓ Ефективний проти бактерій, вірусів, грибів і спор, що дозволяє досягати високого рівня дезінфекції.
- ✓ Може застосовуватись для інструментів, які не витримують високих температур (наприклад, ендоскопічне обладнання).
- ✓ Зберігає активність протягом визначеного часу при правильному використанні.
- ✓ Забезпечує надійне знезараження навіть при значному мікробному навантаженні.
- ✓ Добре проникає у вузькі канали, щілини та складні конструкції медичних виробів.
- ✓ Надійна стерилізація та ДВР.

 Термін придатності робочих розчинів – 28 діб.

СКЛАД ЗАСОБУ

Склад, мас. %: глутаровий альдегід – 9,5, гліоксаль – 7,5, дидецилдиметил-амонійхлорид – 9,6 (діючі речовини), неіоногенні ПАВ, інгібітори корозії, стабілізатори, барвники, ароматична речовина, вода - до 100,0.



КОНЦЕТРОВАНІ РОЗЧИНИ для ПЕРВИННОГО ТА ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОБОРОБЛЕННЯ (ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ)

Децид
DECID



КОНЦЕНТРАТ

Засіб на основі бензалконію хлориду, ізопропілового спирту, дидецилдиметиламонію хлориду, мурашиної кислоти та сурфактантів, призначений для дезінфекції медичних виробів, апаратури й обладнання, включаючи вироби зі складною конструкцією та чутливі до температурної обробки матеріали



ІНСТРУКЦІЯ

Застосовується для обробки медичних інструментів, діагностичного обладнання, приладів та комплектуючих, які потребують ефективного знезараження без використання термічних методів. Підходить для виробів із металу, скла, полімерів та інших матеріалів, що використовуються в медичній практиці.



1 л

5 л

- ✓ Комбінація четвертинних амонієвих сполук, спирту та кислоти забезпечує ефективність проти бактерій, вірусів і грибів та спор.
- ✓ Активні речовини підсилюють ефект одна одної: спирт забезпечує швидку дію, ЧАС — пролонгований антимікробний ефект, кислота — додаткову бактерицидну активність.
- ✓ Наявність сурфактантів сприяє кращому проникненню в забруднення та важкодоступні ділянки виробів.
- ✓ Добре обробляє інструменти зі щілинами, каналами та внутрішніми порожнинами.



Термін придатності робочих розчинів – 28 діб.

СКЛАД ЗАСОБУ

Склад, мас. %: 10,0-15,0 бензалконіуму хлориду; 5,0-10,0 спирту ізопропілового; 5,0-10,0 дидецилдиметиламоніуму хлориду (діючі речовини); кислота мурашина; сурфактант, вода до 100,0. Сировина ANTISEPTICA Dr.Hans-Joachim Molitor, GmbH.

Трицид TRICID



Засіб дезінфікуючий для первинного та
предстерилізаційного оброблення,
стерилізації

КОНЦЕНТРАТ

Дезінфікуючий засіб на основі амінів та спирту призначений для обробки медичних виробів, апаратури та обладнання, включаючи інструменти зі складною конструкцією.

Аміни порушують цілісність клітинних мембран мікроорганізмів і спричиняють денатурацію білків, що призводить до їх загибелі. Ізопропіловий спирт швидко проникає в клітину, коагулює білки та забезпечує швидкий бактерицидний і віруліцидний ефект. Поєднання цих компонентів забезпечує як миттєву, так і пролонговану антимікробну дію.

Застосовується для дезінфекції медичних інструментів, діагностичного обладнання, приладів і комплектуючих. Підходить для виробів із металу, скла та полімерних матеріалів, у тому числі для обробки складних поверхонь, каналів і з'єднань.

- ✓ Ефективний проти бактерій, вірусів і грибів, спор.
- ✓ Амینی забезпечують триваліший антимікробний ефект після обробки.
- ✓ Завдяки спирту забезпечує оперативне знезараження.
- ✓ Ефективно обробляє важкодоступні ділянки виробів.



Термін придатності робочих розчинів – 21 діб.



ІНСТРУКЦІЯ



СКЛАД ЗАСОБУ

Склад, мас. %: 15,0-20,0 N-(3-амінопропіл) –N-додецилпропан-1,3 діаміну; 10,0-15,0 2-пропанол (діючі речовини); моноетиленгліколь, етоксильований спирт, молочна кислота, 1,2,3-бензотріазол, вода до 100,0. Сировина ANTISEPTICA Dr.Hans-Joachim Molitor, GmbH



ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВИСОКОГО РІВНЯ (ДВР) ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ ВМП

Бланідас Еко-стерил **BLANIDAS Eco-steril**



Сучасний порошкоподібний дезінфекційний засіб на основі перкарбонату натрію, призначений для проведення дезінфекції високого рівня (ДВР) та стерилізації медичних виробів

ПОРОШКОПОДІБНИЙ
КОНЦЕНТРАТ



ІНСТРУКЦІЯ

Після застосування активні компоненти розкладаються на екологічно безпечні речовини, не залишаючи токсичних залишків. Засіб сумісний із більшістю матеріалів медичних виробів за умови дотримання рекомендацій щодо використання, що робить його універсальним рішенням для закладів охорони здоров'я.



Термін придатності розчину:
Робочий розчин зберігає активність
до 48 годин

СКЛАД ЗАСОБУ

Вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:
перкарбонат натрію – 42,
тетраацетилендіаміну – 25 (діючі речовини);
допоміжні речовини: лимонна кислота,
стабілізатори, інгібітори корозії.

Діюча речовина – надोцтова кислота – утворюється при приготуванні водного розчину засобу для використання.

При розчиненні у воді утворює надоцтову кислоту, що забезпечує потужну антимікробну дію проти бактерій, вірусів, грибів і спор. Засіб рекомендований для обробки широкого спектра медичних інструментів, включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи, а також інші термолабільні вироби. Завдяки порошкоподібній формі забезпечується зручність транспортування, тривалий термін зберігання та точне дозування робочих розчинів.



Стеривір STERIVIR



КОНЦЕНТРОВАННИЙ
РОЗЧИН

Спеціалізований засіб для дезінфекції медичних виробів, включаючи гнучкі ендоскопи, який оптимально підходить для використання в мийно-дезінфекційних машинах

Ключовою особливістю є відсутність піноутворення, що має критичне значення для автоматичної обробки. Низькопінна формула забезпечує безперебійну роботу обладнання, стабільну циркуляцію розчину та якісне промивання всіх каналів і поверхонь інструментів. Засіб гарантує ефективну дезінфекцію високого рівня.



ІНСТРУКЦІЯ

- ✓ Ключова перевага для мийно-дезінфекційних машин, забезпечує стабільну циркуляцію розчину без збоїв у роботі обладнання.
- ✓ Зберігає активність у стандартних програмах МДМ і репроцесорів ендоскопів.
- ✓ Ефективний проти бактерій, вірусів, грибів і мікобактерій, що критично для ендоскопічного обладнання.
- ✓ Не пошкоджує делікатні компоненти ендоскопів і складних медичних виробів.
- ✓ Оптимально працює в автоматичних установках із чітко заданими параметрами температури та часу.
- ✓ Автоматизація процесу мінімізує помилки при обробці.
- ✓ Тривалий ресурс робочого розчину дозволяє зменшити витрати при великих об'ємах обробки.



Термін придатності робочих розчинів засобу - 30 діб. Можливість багаторазового застосування впродовж цього терміну.

СКЛАД ЗАСОБУ

20,0 глутарового альдегіду.
Допоміжні речовини: розчинники, барвники, вода – до 100 %.



ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ МВ

(СУХИЙ СПОСІБ)

Бланідас Інстру Фоам

BLANIDAS Instru foam



Триензимний засіб — готовий до застосування засіб у вигляді піни для попереднього очищення медичних інструментів

ГОТОВИЙ ЗАСІБ
У ВИГЛЯДІ ПІНИ



Засіб призначений для попереднього очищення хірургічних та стоматологічних інструментів одразу після використання. Ефективно розм'якшує та видаляє органічні забруднення (кров, білки, тканинні залишки). Може застосовуватися під час довготривалого оперативного втручання або інших тривалих процедур. Також використовують перед проведенням дезінфекції або стерилізації.



ІНСТРУКЦІЯ

- ✓ Не потребує розведення, зручний у щоденній практиці.
- ✓ Пінна добре утримується на поверхнях і проникає у важкодоступні місця.
- ✓ Підтримує інструменти у вологому стані до подальшої обробки.
- ✓ Розщеплює білкові та жирові забруднення.
- ✓ Полегшує етап передстерилізаційної обробки.
- ✓ Безпечний для металу, пластику та інших матеріалів.
- ✓ Може використовуватись під час тимчасового зберігання до миття.

СКЛАД ЗАСОБУ

пропіленгліколь 15-30%,
гліцерин 5-15%, цитрат натрію < 5%, амфотерні
ПАР < 5%, неіонні ПАР < 5%, моноетаноламін
< 5%, протеаза < 5%, ліпаза, амілаза,
консервант, вода до 100%.



Ензоклін ENZOCLEAN



Спеціалізований ферментний засіб
для ефективного очищення медичних
виробів

КОНЦЕНТРАТ

Засіб призначений для очищення хірургічних інструментів, ендоскопічного обладнання (гнучкого та жорсткого), а також інших багаторазових медичних виробів. Ефективно видаляє органічні забруднення (кров, білки, жири, біоплівки) перед проведенням дезінфекції високого рівня або стерилізації.

Може застосовуватися для ручного та автоматичного миття (у мийно-дезінфекційних машинах, ультразвукових ваннах).



ІНСТРУКЦІЯ


- ✓ Синергічна суміш ензимів активно розщеплює білкові, жирові та інші органічні забруднення.
- ✓ Засіб забезпечує повне видалення біоплівок і залишків, що підвищує ефективність наступних етапів обробки.
- ✓ Безпечний для ендоскопів та термолабільних виробів.
- ✓ Підходить для мийно-дезінфекційних машин і ультразвукових систем.
- ✓ Оптимальний для використання в автоматизованих процесах (низьке піноутворення).

СКЛАД ЗАСОБУ

Склад, мас. %: два протеолітичних фермента (савіназа та алкалаза) - 5%, а також ряд функціональних добавок: неіоногенні ПАВ, інгібітор корозії, стабілізатор ферментів, дистильована вода



1 л

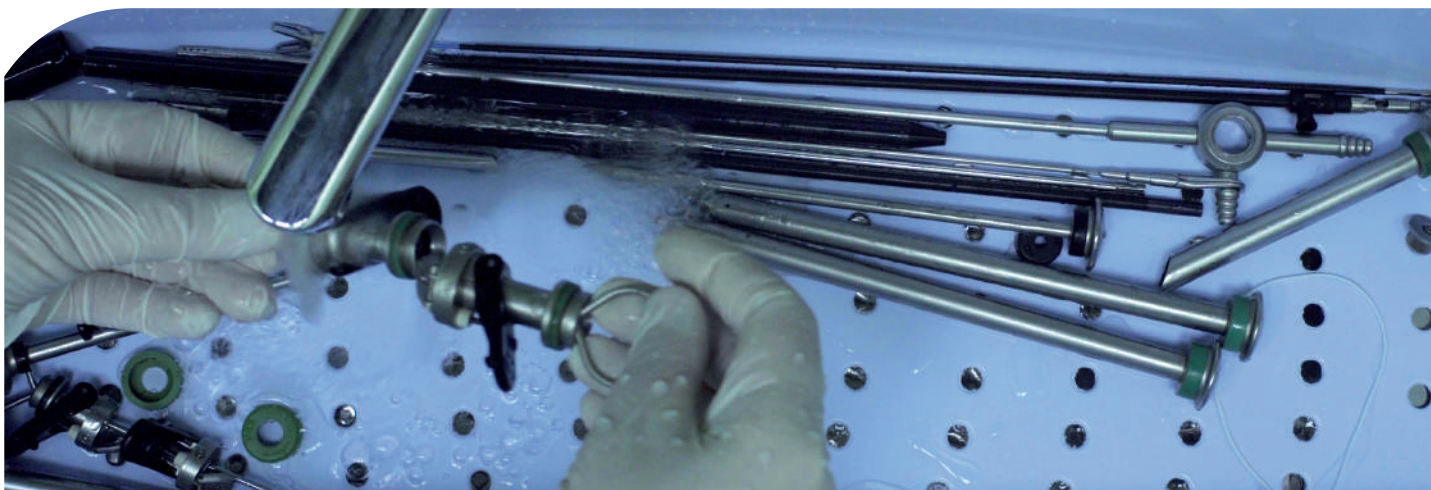

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВИСОКОГО РІВНЯ (ДВР) ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ ГНУЧКИХ І ЖОРСТКИХ ЕНДОСКОПІВ

Бланідас ОПА плюс **BLANIDAS OPA plus**



Високоєфективний засіб для екстреної дезінфекції
високого рівня (ДВР) та стерилізації ендоскопічного
обладнання і термолабільних медичних інструментів

ГОТОВИЙ РОЗЧИН

Призначений для швидкого та надійного знезараження виробів, чутливих до термічної обробки. Засіб підходить для обробки гнучких і жорстких ендоскопів, а також іншого складного медичного обладнання. Може застосовуватися як при ручній обробці, так і в автоматизованих мийно-дезінфекційних машинах, що забезпечує універсальність використання в медичних закладах різного профілю.



ІНСТРУКЦІЯ

5 л



- ✓ Активний проти бактерій, мікобактерій (у т.ч. туберкульозу), вірусів і грибів.
- ✓ Забезпечує дезінфекцію високого рівня за короткий час експозиції - 5 хв.
- ✓ Не потребує приготування робочих розчинів, що зменшує ризик помилок.
- ✓ Не пошкоджує матеріал ендоскопів і термолабільних інструментів.
- ✓ Зберігає активність протягом тривалого часу використання (при дотриманні інструкції).
- ✓ Підходить для мийно-дезінфекційних машин і репроцесорів ендоскопів.
- ✓ На відміну від деяких інших засобів, не потребує змішування перед застосуванням.

СКЛАД ЗАСОБУ

Ортофталевий альдегід 0,55%, (діючі речовини);
антикорозійні компоненти, вода - до 100,0.

Бланідас НОК BLANIDAS NOK



5л + активатор, 50 мл ВМП

Двокомпонентний засіб на основі надоцтової кислоти — сучасний високоефективний дезінфекційний препарат, що складається з двох компонентів, які при змішуванні утворюють активний робочий розчин із вираженою антимікробною дією.

Засіб призначений для проведення дезінфекції високого рівня та стерилізації медичних виробів, включаючи термолабільні інструменти.

- ✓ Ідеальний для матеріалів, що не витримують високих температур
- ✓ Безпечний для пластику, гуми, скла та металів при правильному застосуванні
- ✓ Експрес ДВР та стерилізація інструментів
- ✓ Розкладається на безпечні компоненти (вода, кисень, оцтова кислота)
- ✓ Мінімальний вплив на довкілля

⌚ Термін зберігання засобу при умові застосування — 15 діб з дня першого занурення виробів медичного призначення та при умові щоденного контролю активності діючої речовини за допомогою тест-смужок впродовж 15 діб.

ГОТОВИЙ РОЗЧИН



ІНСТРУКЦІЯ



50 мл

5 л

СКЛАД ЗАСОБУ

Склад засобу - це двокомпонентна система, яка складається з базового розчину та активатора:

активатор - безбарвна або слабозабарвлена рідина з характерним запахом, що містить ацетілкапролактam, пропіленгліколь, поверхнево-активні речовини, інгібітор корозії.

базовий розчин - прозора безбарвна рідина, що являє собою водний розчин перекису водню і допоміжних компонентів: стабілізатора, інгібітора корозії і буферного агента.



ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ, НАРКОЗНО-ДИХАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ, ЛАБОРАТОРНОГО ПОСУДУ, ВЗУТТЯ

Бланідас MAT BLANIDAS MAT

КОНЦЕТРОВАННИЙ РОЗЧИН

Засіб для автоматичного миття медичних виробів — спеціалізований препарат для ефективного очищення в автоматизованих системах обробки Matachana, Miele, Melag, Siemens, GMEG, SMS, Sterimed, MMM.

Засіб призначений для автоматичного миття хірургічних інструментів, наркозно-дихальної апаратури, лабораторного посуду, скла, а також медичного та спеціального взуття у мийно-дезінфекційних машинах.



ІНСТРУКЦІЯ

5 л



Забезпечує якісне видалення органічних і неорганічних забруднень, підготовлюючи вироби до подальшої дезінфекції або стерилізації. Підходить для використання в структурних підрозділах репроцесингу (СПР) та лабораторіях.

- ✓ Видаляє білкові, жирові, лікарські та інші забруднення.
- ✓ Низьке піноутворення не перешкоджає циркуляції розчину та якості миття.
- ✓ Не залишає розводів і відкладень на поверхнях.
- ✓ Ефективний при різних температурних режимах — підходить для стандартних програм миття.
- ✓ Забезпечує стабільну роботу мийно-дезінфекційних машин.
- ✓ Безпечний для металу, скла, пластику та гуми.
- ✓ Економічний у використанні — низькі концентрації.
- ✓ Універсальність застосування — один засіб для різних типів медичних виробів і обладнання.

СКЛАД ЗАСОБУ

Фосфати 5-15%, гідроксид калію, силікати.

Концентрація р/р: 0,5% очищення проводять шляхом програмного набору згідно інструкцій виробників машин.

Бланідас Нейтраль

BLANIDAS NEUTRAL

Концентрований розчин для усунення наслідків жорсткої води під час автоматичного миття медичних виробів

КОНЦЕНТРОВАНІЙ РОЗЧИН



ІНСТРУКЦІЯ

Засіб призначений для нейтралізації солей жорсткості води та видалення мінерального нальоту з хірургічних інструментів у процесі автоматичного миття в мийно-дезінфекційних машинах. Використовується на етапі ополіскування або нейтралізації після основного миття для запобігання утворенню відкладень і плям.

- ✓ Усуває кальцієві та магнієві відкладення.
- ✓ Забезпечує чистоту без розводів і плям.
- ✓ Запобігає корозії та пошкодженню поверхонь.
- ✓ Оптимізований для автоматичних систем — стабільно працює у мийно-дезінфекційних машинах.
- ✓ Концентрована формула — економічний у використанні.
- ✓ Сумісність із матеріалами — безпечний для нержавіючої сталі, скла та інших матеріалів.
- ✓ Продовжує термін служби інструментів — підтримує їх у належному технічному стані.

СКЛАД ЗАСОБУ

Лимонна кислота 5-15%, фосфорна кислота менше 5%.
Концентрація р/р: 0,15% очищення проводять шляхом програмного набору згідно інструкцій виробників машин.



ЗАСОБИ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ

Діадез НЬО DIADEZ NEW

Засіб дезінфікуючий для дезінфекції
апаратів для гемодіалізу



ІНСТРУКЦІЯ

Призначення:

- ✓ для видалення осаду кальцію та магнію в гідравлічному контурі апаратів «штучна нирка» та на поверхнях гемодіалізного обладнання;
- ✓ для дезінфекції контуру циркуляції діалізуючої рідини апаратів для гемодіалізу.

Засіб володіє високою бактерицидною (вкл. мікобактерії туберкульозу), фунгіцидною, віруліцидною (вкл. гепатити А,В,С, ВІЛ) активністю.

СКЛАД ЗАСОБУ

Моногідрат лимонної кислоти - 50,0;
функціональні добавки: стабілізатор, інертні компоненти, вода дистильована.



Діал ГПХН DIAL GPCN



ІНСТРУКЦІЯ

Засіб дезінфікуючий для
дезінфекції апаратів
для гемодіалізу

5 л

Призначення:

- ✓ для видалення осаду кальцію та магнію в гідравлічному контурі апаратів «штучна нирка» та на поверхнях гемодіалізного обладнання;
- ✓ для дезінфекції контуру циркуляції діалізуючої рідини апаратів для гемодіалізу.

Засіб володіє високою бактерицидною (вкл. мікобактерії туберкульозу), фунгіцидною (вкл. кандидози, дерматомікози), віруліцидною (вкл. гепатити А, В, С, ВІЛ) активністю.

СКЛАД ЗАСОБУ

Гідрохлорид натрію 1,15 г (g), допоміжні речовини, вода.



5 л



Діал ОКЦИ DIAL OXY



Засіб дезінфікуючий для
дезінфекції апаратів для
гемодіалізу

Призначення:

- ✓ для видалення осаду кальцію та магнію в гідравлічному контурі апаратів «штучна нирка» та на поверхнях гемодіалізного обладнання;
- ✓ для дезінфекції контуру циркуляції діалізуючої рідини апаратів для гемодіалізу.

Засіб володіє високою бактерицидною (вкл. мікобактерії туберкульозу), фунгіцидною (вкл. кандидози, дерматомікози), віруліцидною (вкл. гепатити А, В, С, ВІЛ) активністю.

СКЛАД ЗАСОБУ


Надоцтова кислота 0,5, перекис водню 10,0, оцтова кислота 7,0, стабілізатор, вода



ІНСТРУКЦІЯ



e-mail: help@blanidas.ua
www.blanidas.ua

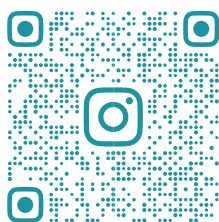

@MEDCLEAN.STORE